



# Antigen-Selbsttests für Schülerinnen und Schüler

Nur 2 Zentimeter tief in der eigenen Nase drehen!  
Kurz und schmerzlos! Ergebnis in 15 Minuten!

Was braucht man dazu?

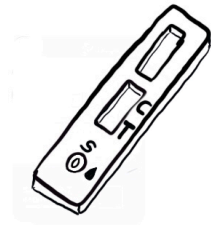

Testkassette

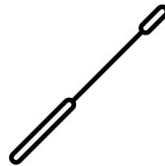


Stäbchen mit Tupfer



Lösung

Wie funktioniert's?

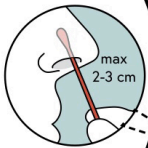


## Schritt 1:

- Tupfer **NUR 2 Zentimeter** in die Nasenhöhle stecken
- Tupfer 5 Mal im Kreis drehen
- Nasenhöhle wechseln, Drehen wiederholen




## Schritt 2:

- Lösung am Lila ' Deckel aufdrehen. Deckel ablegen.
- Stäbchen mit der Tupferseite in die Flüssigkeit eintauchen und mehrmals drehen und drücken. **15sec.**

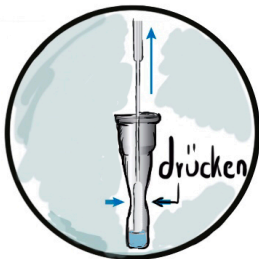

## Schritt 3:

- Beim Herausziehen des Stäbchens, die Lösungsflasche zusammendrücken, um das Stäbchen „auszuwringen“.
- Lila Deckel wieder aufschrauben und weißen kleinen Deckel entfernen.

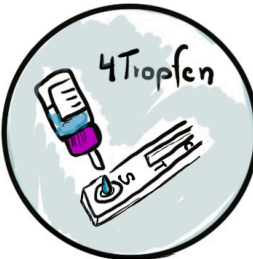

## Schritt 4:

- **4 Tropfen** der Lösung auf die Testkassette in die Vertiefung beim Buchstaben „S“ tropfen.
- Testkassette nicht mehr bewegen.
- **15 Minuten** abwarten.



## Schritt 5:

- Testergebnis positiv:  
Schulleitung kontaktieren. Nach Hause gehen und Termin für PCR Test machen. Quarantäne.
- Test negativ:  
Gesund bleiben und weiter die Schule besuchen

## Ergebnismöglichkeiten

